

## AquaClean Mini – Vortex-Mikrodermabrasion mit Säuren

### Das 3 in 1 Anti-Age Profigerät für eine strahlende, gesunde Haut:

1. Chemisch-mechanisches Peeling (Exfoliation, Dermalinfusion): 3-stufige Nass-Mikrodermabrasion mit Milchsäure, Salicylsäure und Omega3
2. Microcurrent für die Hautstraffung und den Liftingeffekt (Double Lifting)
3. Elektroporation zur Wirkstoffeinschleusung mit gleichzeitiger Farblichttherapie



### Was unterscheidet den AquaClean Mini vom bekannten HydraFacial?

Beide Systeme sind nahezu identisch in Bezug auf das Vortex-Reinigungskonzept. Der AquaClean Mini hat zusätzlich ein Handstück mit Microcurrent für das straffen der Haut und den Liftingeffekt. Beide Systeme haben die Elektroporation für die Einschleusung von Wirkstoffen. Der AquaClean Mini ist bei gleichen Nutzen wesentlich günstiger als das HydraFacial.

### Was sind die Effekte der neusten Vortex-Nassmikrodermabrasion?

Feine/glatte Hautoberfläche durch Lösung der Verhornungen, elastische und straffe Haut, kleine Poren, mehr Festigkeit, Aktivierung der Collagen und Elastinbildung und eine sichtbar reduzierte Faltentiefe. Die hervorragende und unvergleichbare Tiefenreinigung als Mix aus Mechanik und Chemie liefert die Plattform für die effektivste Einschleusung von Wirkstoffen durch Aufklopfen, Ultraschall, Elektroporation etc.

### Wie ist die Wirkungsweise vom Vortex-Reinigungskopf mit den Solutions?


Der AquaClean Mini Vortex-Einwegkopf steuert über Vakuum und den Wirkstoffdruck die Abtragung der äusseren Hornschicht. Das dreistufige Verfahren mit Milch-, Salicylsäure und einem Wirkstoffcocktail wirkt zusammen mit dem Vortexkopf als schmerzlose mechanisch-chemische Abtragung und Wirkstoffeinschleusung. Die Dosierung kann hierbei je nach Hauttyp und Indikation individuell angepasst werden.

### Wie ist die Wirkungsweise von Hautstraffung mit Micro-Current?

Überkreuzender Mikrostrom stimuliert die Zellstruktur der Haut und erzeugt eine elastischere und weichere Haut. Dabei wird die Gesichtsmuskulatur durch die elektrischen Impulse angeregt und bewirkt eine Straffung der Haut durch die Zirkulation von Mikrostrom.

### Wie ist die Wirkungsweise der Elektroporation zur Wirkstoffeinschleusung?

Elektromagnetische Radiowellen erzeugen Vibrationen im Gewebe, die dafür sorgen, dass sich der in der Zellwand befindliche Proteinkanal für wenige Millisekunden öffnet und Wirkstoffe in tiefere Hautschichten, in denen Hautwachstum und Regeneration stattfinden, eindringen können. Auf diese Weise lassen sich aktive und therapeutisch wirksame Substanzen einschleusen, die die Haut regenerieren und umstrukturieren. Ähnliche Verfahren sind der Ultraschall oder die Iontophorese, jedoch ist die Elektroporation das wirkungsvollste Einschleuseverfahren ohne Nadelsystem auf dem Markt (siehe nachfolgende Grafik).

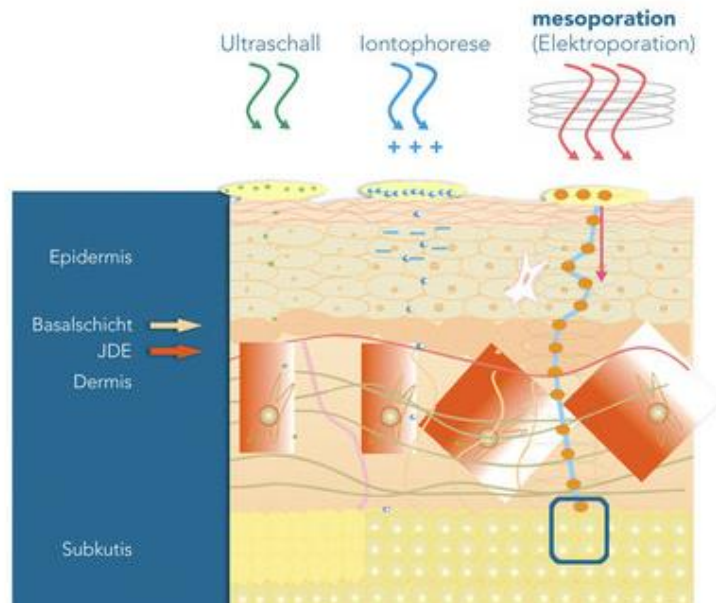

Zu der Elektroporation kann gleichzeitig im Handstück das Farblicht dazu geschaltet werden. Zur Auswahl stehen: Rotlicht (anregend), Blaulicht (beruhigend) und Weiss-Violettes Licht (stärkend)

#### Indikationen

- Überverhornungen
- grobes Hautrelief
- Falten
- Hautalterung
- Lichtschäden
- Atrophien
- Unreinheiten bis hin zur "Akne"
- Altersflecken und Pigmentstörungen
- Narben
- Striae/Schwangerschaftsstreifen
- Vorbehandlung für Permanent Make-up
- Vor- und Nachbehandlung zur Faltenunterspritzung
- Prä- und Post-Treatment ästhetische Chirurgie

#### Kontraindikationen

- Muttermale (Naevi)
- Hautkrebs (insbesondere "schwarzer" Hautkrebs *lentigo maligna melanom* bzw. der Verdacht darauf)
- Psoriasis vulgaris (Schuppenflechte)
- Neigung zu Keloid-Narben
- Einnahme von Vitamin A-Säure (Isotretinoin-Präparate), akute Akne
- Aktive Herpes (bakterielle oder virale Infektionen)
- Rosazea (entzündliche Hautveränderungen, Sonnenbrand, u.a.)
- Krebs- oder Steroid-Therapien
- Wulstige Narben (Keloide)
- Schwangerschaft, Stillzeit

**Was unterscheidet den AquaClean Mini von den anderen Mikrodermabrasionsverfahren?**

Die trockenen Mikrodermabrasionsverfahren mit Sand, Kristallen oder Diamantköpfen können sich rau oder schmerzhaft anfühlen. Bei kontaktlosen Mikrodermabrasionen mit einem Wasserstrahl wie JetPeel fehlt oft die Tiefenwirkung. Die neueste Generation der Mikrodermabrasion mit dem AquaClean Mini oder HydraFacial wirkt mit dem Vortex-Einwegkopf sowie den auflösenden Säuren (Milchsäure, Salicylsäure) wie eine mechanisch-chemische Doppelpenetration.

**Wie lange dauert eine Einzelbehandlung?**

Die Behandlung von Gesicht und Hals dauert zwischen 40 und 50 Minuten.

**Wie viele Behandlungen werden empfohlen?**


Grundsätzlich hängt die Anzahl der Behandlungen von dem individuellen Hautzustand ab. Empfehlenswert sind in der Regel Behandlungen alle 3-6 Wochen, bei starken Unreinheiten alle 2 Wochen, um das Hautbild nachhaltig zu verbessern.

**Wie fühlt sich die Haut nach der Behandlung an?**

Direkt nach der Mikrodermabrasion kann eine leichte Rötung (Durchblutung) und ein Spannungsgefühl (die Poren ziehen sich zusammen) auftreten. Diese verschwinden jedoch meistens nach der Elektroporation vollständig. Im Ausnahmefall und bei intensiver Mikrodermabrasion kann die Rötung einige Stunden anhalten. Die Behandlung ist schmerzlos, kann in Einzelfällen als unangenehm empfunden werden, v.a. die Diamant-Mikrodermabrasion.

**Der AquaClean Mini-Behandlungsprozess**

1. Anamnese, Aufklärung und Einverständniserklärung durchführen.
2. Das Gesicht, bzw. die zu behandelnde Fläche gründlich reinigen.
3. Handschuhe und Mundschutz tragen wird empfohlen.
4. Erst die rechte Gesichtshälfte und dann die linke Gesichtshälfte von innen nach aussen (Richtung Lymphfluss) behandeln. Es wird in 2-3 cm langsamen Bahnen gearbeitet. Bei dünner oder faltiger Haut sollte die Haut leicht gespannt werden. Die Augenhöhlen ausschliessen. Falten intensiv mit Mehrfachüberlappungen behandeln, Drehbewegungen im Nasenbereich.
5. Immer alle zwei Reinigungsstufen nacheinander abarbeiten.
6. Einzelne Zonen mit dem Microcurrent Handstück behandeln und die Hautstraffung anregen.
7. Ausreichend Serum (Hyaluron, Vitamine etc.) auf die Haut aufklopfen und anschliessend mit dem Elektroporations-Handstück einarbeiten
8. Abschluss der Behandlung mit Maske, Abschlusspflege, Sonnenschutz. Z.B. LED-Rotlicht für 20 Minuten (nicht bei stark geröteter Haut)

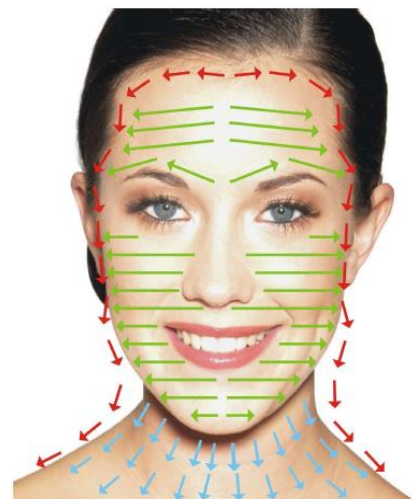

### Verhaltensmassnahmen

- starkes Schwitzen vermeiden
- Verzicht auf Schwimmbad, Solarium und Saunabesuch
- keine Staub- und Schmutzarbeiten durchführen
- bei Sonneneinstrahlung hohen LSF verwenden
- vor dem Auftragen von Pflegepräparaten gründlich die Hände reinigen
- Heimpflege: viel Feuchtigkeit, hautaufbauende & regenerierende Substanzen. Sonnenschutz.

### Empfohlene Verkaufspreise für die AquaClean Mini-Behandlung

Therapie	Preis in CHF
Gesicht, Hals (40-50 Minuten)	100.-- bis 170.--
Gesicht und Dekolleté (60 Minuten)	150.-- bis 200.--
Abos mit 3-6 Behandlungen	Rabatt 10% bis 20%

### Gerätebeschreibung



**A** . Handstück für Nass-Mikrodermabrasion mit Vacuum

**B** . Handstück für Electroporation (Level 1 – 10 einstellbar im Display F)

**C** . Handstück für Hautstraffung mit Mikrostrom (Double Lifting) (Level 1 – 10 einstellbar im Display F)

**D** . Einstellung der Vakuum- & Feuchtigkeitsstärke für jede Solution 1 - 3

**E** . Auswahl der Solution durch Ventilstellung Offen/Geschlossen

**F** . LCD Anzeige für Elektroporation und Hautstraffung (Double Lifting)

**G** . Behälter für verschmutztes Wasser (2.5l)

### Wartungstipps

Nach jedem Behandlungstag sind die Leitungen mit der Solution 4 durchzuspülen und zu reinigen. Hierzu wird die Flasche mit der Solution 4 anstelle der Solution 1 eingesetzt und das System für 1 Minute durchgespült. Anschliessend kann wieder die Flasche mit der Solution 1 eingesetzt werden. Das Gerät und die anderen zwei Handstücke können mit Gerätereinigung abgerieben und desinfiziert werden.

### Verbrauchsmaterial

Alle 4 Solutions können Sie als Konzentrat in 30-50ml Flaschen zum Verdünnen auf 500ml mit destilliertem Wasser einzeln bestellen. Sie benutzen hierzu die bestehenden leeren Flaschen im Gerät und erhalten einen Gummi-Verschluss zum Schütteln der Mischung vor dem Einsetzen in das Gerät.

Die Vortex-Aufsätze sind in den Grössen Klein und Gross im 10er Set bestellbar.

Für die Hautstraffung und Elektroporation empfehlen wir unsere Skinforce Wirkstoffe.

### Technische Spezifikationen AquaClean Mini

Gerätetyp:	Beautygerät mit CE Zertifizierung und EU-Konformität Internationale Klasse 1 Typ BF Vakuum, Elektroporation, Mikrostrom (Double Lifting)
Technologie:	Vortex-Nassmikrodermabrasion, Mikrostrom (Double Lifting), Elektroporations-Handstück
Handstücke:	1 Vortex-Handstück 1 Mikrostrom Handstück (Double Lifting) 1 Elektroporation Handstück bis 12 Volt und 300mA
Anwendung:	Anti-Aging, Hautverjüngung, Hauttexturverbesserung, Porenverkleinerung, Faltenglättung, Fleckenreduktion, Hautreinigung
Spannung, Sicherung:	220V ~ 240V, 50/60Hz
Grösse (btxh):	43x38x38cm
Gewicht:	17 kg
Garantie:	12 Monate Bring-In Garantie
Hersteller:	Eunsung Global Corporation, Südkorea
Exklusivtrieb Schweiz:	V-Skin Medical Beauty AG