



## A|C|C|O|R Cosmetic Corrector

### Funktionsweise und Anwendungsbereiche

#### Wirkung und Prinzip des A|C|C|O|R Cosmetic Corrector:

Durch die ionisierte Gaswolke eines Lichtbogens wird die überschüssige Haut punktförmig verdampft. Die Hitze führt zu einer Straffung der umgebenden Haut. Diese Straffung wird sich noch für Wochen nach der Behandlung verstärken, da es zu einem langsamen Aufbau neuer Kollagenfasern kommt.

Die durch die Behandlung auftretende Hitze führt zu einer Aktivierung des Immunsystems und einer nachfolgenden Entzündungsreaktion. Die normal auftretenden Beschwerden variieren in ihrer Stärke je nach Person und können mehr oder weniger ausgeprägt sein. Die typischen Symptome sind Rötung, Schwellung, Hitzegefühl und Schmerzen.

#### Vorbehandlung:

Die Haut ist unbedingt von Make-up, Cremes oder sonstige Produkten zu befreien. Danach benutzen Sie bitte eine Hautdesinfektion (nicht alkoholisch). Vor der Behandlung von Solarienbesuchen (min. 5 Tage) abraten. Am Behandlungstag keinen Kaffee. Mindestens 2 Tage vorher keinen Alkohol und kein Aspirin.

#### Während der Behandlung:

Die behandelte Stelle kann zwischendurch mit Octenisept betupft werden. Bitte vermeiden Sie bei straffenden Behandlungen das Entfernen der Krusten. Dies ist ausschließlich bei Skintags und Pigmentierungen angebracht. Hierbei wird die zuvor mit dem A/C/C/O/R behandelte Haut mit einem Wattepad und Bepanthen antisept oder Tyrosurgel als Gleitmittel und Wundpflege abgerieben.





## Anwendungsbereiche

### HAUTSTRAFFUNG DES OBEREN AUGENLIDS

Nur mit allen Standardanweisungen im A|C|C|O|R-Handbuch zu verwenden.

Topisches Anästhetikum auftragen.

Schieben Sie den Augenbrauenbereich nach unten, um den zu behandelnden Faltenbereich zu bewerten.

Behandeln Sie auf und über der Falte, indem Sie eine Reihe von Punkten in 1,0 mm bis 2,0 mm Abstand zueinander schaffen

**Hinweis:** Der Mindestabstand zwischen der Wimpernlinie und jedem Punkt muss 3,0 bis 4,0 mm betragen, um etwaige Schwellungen zu minimieren.

Jeder Punkt wird erstellt, indem in einem Abstand von 1,0 bis 2,0 mm eine Sekunde lang über die Haut gefahren wird, und die Haut danach eine Sekunde lang berührt wird.

**Hinweis:** Es wird empfohlen, sich hauptsächlich auf den Bereich von der Augenlidmitte hin zur Außenkante zu konzentrieren.

Dadurch wird der Effekt maximiert und Ausfallzeiten verringert, da es weniger Haut in Richtung des Innenbereichs gibt, wo die Ergebnisse nicht so beeindruckend sind, die Schwellung größer und die Ausfallzeit länger ist.





### **LINIEN IM PERIORBITALBEREICH**

Nur mit allen Standardanweisungen im A|C|C|O|R-Handbuch zu verwenden.

Topisches Anästhetikum auftragen

Fahren Sie das Gerät in einem Abstand von 1,0 mm bis 2,00 mm zur Hautoberfläche.  
Schaffen Sie im Bereich neben der zu behandelnden Linie auf beiden Seiten eine Reihe von Punkten im Abstand von 1,0 mm zueinander.  
Nach Bedarf wiederholen, bis die Behandlung abgeschlossen ist.

### **ENTFERNUNG / UMMODELLIERUNG VON PERMANENT-MAKE-UP**

Nur mit allen Standardanweisungen im A|C|C|O|R-Handbuch zu verwenden.

Gilt nur für Fachleute mit Kenntnissen im Bereich Permanent-Make-Up, die zur Ummodellierung der Augenbrauen eine neue Behandlung anwenden können.

Topisches Anästhetikum auftragen.

Fahren Sie das Gerät in einem Abstand von 1,0 mm bis 2,00 mm zur Hautoberfläche.  
Erstellen Sie eine Reihe von Verbindungspunkten, bis der zu behandelnde Bereich vollständig abgedeckt ist (die benötigte Zeit zur Erstellung eines jeden Punkts variiert von Kunde zu Kunde).  
Tragen Sie ein Salz-/ Tyrosurgemisch auf die behandelte Fläche auf und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken. Entfernen Sie das Salz und reinigen Sie die behandelte Fläche vorsichtig.  
Heilsalbe auftragen.

**Hinweis:** Die Anweisungen zur Nachbehandlung, die zum Zeitpunkt der Behandlung dargelegt werden, müssen unbedingt strengst befolgt werden.

**WICHTIG: Die Abheilung kann bis zu 3 Wochen andauern!**





### **AKNE - NARBENREDUZIERUNG**

Nur mit allen Standardanweisungen im A|C|C|O|R-Handbuch zu verwenden.

Warnung – Vergewissern Sie sich, dass es keine aktive Akne gibt und der Kunde mindestens seit drei Jahren Akne frei ist, der Kunde keine Medikamente gegen Akne einnimmt (z.B. Accutane, Roaccutane) und der Kunde nicht anfällig für Keloidbildung (überschießende Narbenbildung) oder hypertrophe Narbenbildung ist – Im Zweifelsfalle nicht behandeln.

### **ERHABENE RÄNDER**

Fahren Sie das Gerät in einem Abstand von 1,0 mm bis 2,00 mm zur Hautoberfläche.

Erstellen Sie eine Reihe von Verbindungspunkten oder verwenden Sie die Sprühtechnik auf dem erhabenen Bereich, um das ungewollte erhabene Gewebe zu Entfernen.

Prüfen Sie dies ständig, um sicherzustellen, dass die Behandlung nur Gewebe entfernt, so dass das Endergebnis auf der Höhe der umgebenden Haut liegt.

### **Eingesunkene (atrophe) Narben**

**Warnung – NICHT IN DEN NARBENBEREICH HINEIN BEHANDELN**

Verwenden Sie die Schrumpftechnik, um eine Reihe von Punkten im Abstand von 1,0 mm bis 2,0 mm zueinander und 1,0 mm entfernt vom Narbenrand zu schaffen, bis die Narbe vollständig umgeben ist.

Jeder Punkt wird erstellt, indem in einem Abstand von 1,0 bis 2,0 mm eine halbe Sekunde lang über die Haut gefahren wird.

### **HAUTSTRAFFUNG UNTER DEM AUGE**

Nur mit allen Standardanweisungen im A|C|C|O|R-Handbuch zu verwenden.

Topisches Anästhetikum auftragen.

EOB Fluid auf den zu behandelnden Bereich auftragen.

Die Behandlung sollte zu Beginn mindestens 2.0mm bis 3.0mm vom unteren Augenlid entfernt sein.

Platzieren Sie die Korrektor-Spitze auf der Hautoberfläche am Außenrand des zu behandelnden Bereichs.

Aktivieren Sie das Gerät und ziehen Sie es vorsichtig in einem Bogen um die Form des Auges in die gewünschte Richtung über die Hautoberfläche. (Der A|C|C|O|R Cosmetic Corrector) sollte dabei im Kontakt mit der Haut bleiben, bis der Bogen vollendet ist).

Am Ende des Bogens lassen Sie die Power-Taste los, um das Gerät zu deaktivieren.

Wiederholen Sie diesen Vorgang in einem Muster von 1,00 mm Abstand, bis die zu behandelnde Fläche abgedeckt ist.

Wenn dieser Vorgang korrekt befolgt wird, kommt es für den Kunden praktisch zu keiner Ausfallzeit- ggfls. zu leichten Schwellungen.





### **Skintags und Pigmentflecken**

Nur mit allen Standardanweisungen im A|C|C|O|R-Handbuch zu verwenden.

Erstellen Sie eine Reihe von Verbindungspunkten oder verwenden Sie die Sprühtechnik auf dem erhabenen oder pigmentiertem Bereich, um das ungewollte erhabene Gewebe zu entfernen. Fibrome mit der Pinzette sanft anheben und mit dem Lichtbogen abtrennen.

Prüfen Sie ständig den Hautbereich, um sicherzustellen, dass die Behandlung nur das ungewollte/ pigmentierte Gewebe entfernt und Sie nicht in die Gewebetiefe reinarbeiten.





### Nachpflege:

Unsere Erfahrungswerte haben gezeigt, dass eine trockene Wundheilung zu bevorzugen ist. Bitte auf keinen Fall kühlen. Die Thermoreaktion der Haut ist durch die Hitze vorübergehend gestört, es würde zu Mehrdurchblutungen kommen und es kann zu Erfrierungen kommen. Ein Naturmittel zum Ableiten der Schwellung sind z.B. aufgeschnittene Erdbeeren, die auf die behandelte Stelle aufgelegt werden können. Auch Karazym ist ein probates hömopathisches Mittel zur Abschwellung und schnellen Heilung. Empfehlung 3x2.

Gegen die vorübergehenden Schmerzen kann ein handelsübliches Schmerzmittel eingenommen werden.

Die sich bildenden punktförmigen Krusten dürfen nicht entfernt werden und fallen von allein in 5-8 Tagen ab. Jede Manipulation kann zu **Narbenbildung** führen.

Für einen befriedigenden Erfolg der Behandlung ist eine korrekte und ungestörte Abheilung unerlässlich. Die Krusten müssen trocken abheilen. Zur Nachpflege bitte ausschließlich die Präparate benutzen, die wir Ihnen wie folgt empfehlen:

Direkt nach der Behandlung wird zum Abschluss die Haut mit Octenisept desinfiziert, ganz dünn mit Bepanthen antisept oder Tyrosurgel behandelt und mit Oxygenetics abgedeckt. Oxygenetics sollte täglich morgens vom Kunden erneuert werden. Dies fördert die Heilung, schützt vor UV-Strahlung und somit vor Hyperpigmentierungen und deckt wunderbar ab.

Bitte für die Zeit der Heilung auf Make Up - Produkte verzichten und das Gesicht nur mit klarem Wasser und ggfls. mit Kernseife oder antibakteriellem Waschgel (ph-Wert regulierend) reinigen.

Nach der vollständigen Verheilung ist ein Lichtschutzfaktor von mindestens 50 für wenigstens 3 Monate aufzutragen. An den behandelten Stellen kann es sonst durch eine ungleiche **Melaninbildung** zu Pigmentverschiebungen und dunklen Flecken kommen. Dieses gilt auch für Solarien!!!

Die Haut unter den Krusten ist empfindlich. Die Rötung der behandelten Stellen kann bis zu 6 Monate andauern. Um die Heilung zu fördern hat sich das Narbenpflegeprodukt „SCARECARE“ (beinhaltet Emuöl) bewährt. Dieses ist auch mit Lichtschutzfaktor erhältlich. Auch mit „MediGel“ und Auriderm haben wir die Heilung positiv beeinflusst.

Bitte beachten Sie, dass je nach Umfang der gewünschten Korrektur oftmals eine mehrmalige Behandlung notwendig sein kann. Diese sollten frühestens 8 bis 12 Wochen nach der Erstbehandlung erfolgen.





### Kontraindikationen

- Schwangerschaft
- Die Anwesenheit von Metallgelenkersatz im Körper
- Schrittmacher
- Aktuelle Entzündung
- Hautläsionen
- Krebs
- Krampfadern
- Knochenkrankheiten
- Epilepsie, Autoimmunkrankheiten und Diabetes
- Kelloidneigung
- Fadenlifting/Botox (diesen Bereich großzügig aussparen) und in der Aufklärung extra vermerken
- Für Hyaluronfiller/Botox gilt immer....Erst A|C|C|O|R Behandlung, dann kann nach 6-8 Wochen unterspritzt werden.
- Sollte schon Hyaluron/Botox unterfillert sein, den Bereich bitte komplett aussparen und in der Aufklärung extra vermerken





### Tipps & Tricks:

Bitte klären Sie den Kunden genau auf – zeigen Sie auch unschöne nachher-Fotos mit Schwellungen, um den Kunden bestmöglich auf die darauffolgenden Tage vorzubereiten. Verheimlichen Sie niemals die optischen Ausfallzeiten!

Geben Sie dem Kunden für die Erstversorgung etwas Oxygenetics mit. So kommt dieser erst gar nicht in Versuchung, die behandelte Stelle selbst zu versorgen. Kunden sind da manchmal sehr erfinderisch.

Bitte nicht verzagen, wenn das Endergebnis nicht sofort dem Kundenwunsch entspricht. Weisen Sie bei der Aufklärung immer auf die eventuelle Notwendigkeit weiterer Behandlungen hin.

Lymphlider/ Fettlider sind oftmals schwieriger zu behandeln, bringen aber oftmals sehr zufriedene Kunden mit tollen Ergebnissen. Achten Sie hierbei darauf, weniger den Hautüberschuss zu bearbeiten – sondern mehr Richtung Brauenbogen mit einem etwas längerem „Tip“ zu arbeiten. Denn hierbei ist der Liftingeffekt eher durch eine tiefe Straffung im Gewebe statt Hautwegdampfen zu erreichen.

Scheuen Sie sich nicht, uns im Bedarfsfall um Rat zu fragen. Es gibt keine dummen Fragen – nur dumme Antworten!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

Ihr A/C/C/O/R – Team







## A|C|C|O|R Cosmetic Corrector Schulungen

Das Interesse für unseren A|C|C|O|R wächst stetig - somit auch der Wissensdurst rund um die Plasma-Anwendung mit unserem Cosmetic Corrector.

Daher möchte Wir Ihnen Trainer und Ansprechpartner für unsere Schulungen vorstellen.

**\*\*Birgit Möller\*\***

für A|C|C|O|R Vorstellung / Starter

**\*\*Sabine Brandt / Carmen Brinkmann-Mlotek\*\*** für A|C|C|O|R Pro und A|C|C|O|R Medical Beauty Master

Wir freuen uns sehr Ihnen/Euch ein Schulungskonzept vorstellen und anbieten zu können, dass jeden in die Lage versetzt auf „seinem Level“ mit diesem Gerät zu arbeiten und das Maximum an Ergebnissen zu erzielen.

### A|C|C|O|R Starter:

Mit dem Erwerb des A|C|C|O|R, s erhalten Sie auch eine Basis-Einführung.

Dieses ist die Grundlage für den erfolgreichen Start zur Erreichung eines nächsthöheren Kosmetiklevels.

Die Basis-Einführung ist zwingend Voraussetzung im Umgang mit dem Ästhetic Cosmetic Corrector (A|C|C|O|R).

Dieses beinhaltet neben der Vorstellung, die Handhabung des Gerätes, die Aufklärung des Kunden, das Verkaufsgespräch und die individuelle Einbindung in ihr Studiokonzept.

Sie werden lernen, kleinere Makel sekundenschnell zu entfernen und eine leichte Oberlidstraffung bei geringen Hautüberschuss am Auge durchzuführen.

Nachsorge und Pflege bilden den Abschluss der Einführung.

Anwenderhandbuch, Zertifikat und die Aufnahme in die Accor-Supportgruppe sowie Gebietsschutzvereinbarung. (12 Monate kostenlos inklusive)





### A|C|C|O|R Pro:

Sie wollen mehr als nur „Starten“?

Sie möchten ein erprobtes Konzept zur Umsatzsteigerung?

In diesem „Hands on Training“ vermitteln wir Ihnen intensive Kenntnisse über das Gerät nachdem Sie ein paar Erfahrungen sammeln konnten und erste Erfolge hatten.

Schulungsinhalte ist hauptsächlich die Oberlidstraffung als fortgeschrittenes Training – die Behandlungsansätze bei Fett-/Lymphlidern und deutlichem Hautüberschuss. Spezielle Nachsorge bei intensiven Behandlungen und Abheilungsverläufe zur besseren Kundenaufklärung.

Das „Hands on Training“ wird Ihnen verschiedene Techniken für die Oberlidstraffung inkl. Krähenfüße, Glabella 3D Lift, Periorale Behandlung und Hydroporation vermitteln und sie werden dieses praktisch an Modellen unter professioneller Aufsicht üben können.

Schulungspreis / 1 Tag: 750,00 € // ca. 4 Teilnehmer





### **A|C|C|O|R Medical Beauty Master:**

Sie möchten ein 360 Grad Konzept zur Haut- und Gesichtsverjüngung?

Sie möchten den Accor in Kombination mit anderen Anwendungen im vollen Umfang nutzen?

An mehreren Modellen werden Facelifts, Brauenlifts, Faltenbehandlungen in Kombination mit verschiedenen Medical-Beauty-Techniken wie Hydroporation, Needling und Kryo/Needling sowohl demonstriert als auch durchgeführt und trainiert.

Als zusätzliches Highlight erlernen Sie ebenfalls die sensationelle Technik der Narbenbehandlung.

Nach diesem Training sind Sie in der Lage, nahezu alle Kundenwünsche zu erfüllen – und Sie heben sich von Ihren Mitbewerbern ab!

Aufgrund des Umfangs der Behandlungen gibt es diese Schulung nur auf Einladung oder durch Bewerbung aus dem Kreis der A|C|C|O|R Pro Nutzer.

Preis auf Anfrage

Informationen und Anmeldung bei den Mastertrainern Sabine Brandt und Carmen Brinkmann Mlotek

